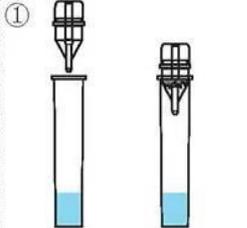
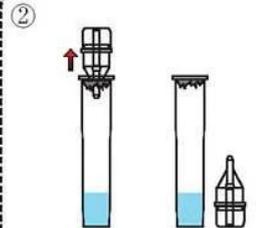
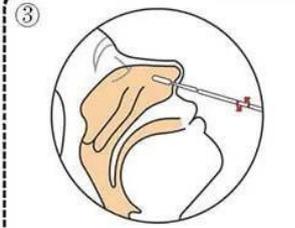


① 

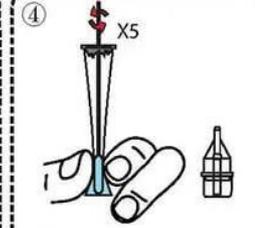
Durchstechen Sie die Dichtungsmembran des Lysepufferrohrs mit der Spitze der Düsenkappe und drücken Sie die Kappe in Richtung des Rohrs, um die Dichtungsmembran vollständig zu öffnen.

② 

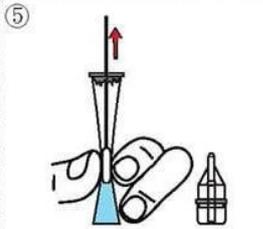
Entfernen Sie die Düsenkappe vom Rohr und legen Sie diesen mit der Schutzabdeckung nach unten auf die Arbeitsfläche.

③ 

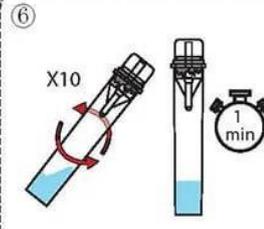
Führen Sie den Abstrichtupfer in Ihr Nasenloch ein und drehen Sie diesen mindestens 15 Sekunden und streichen dabei die Nasenwand ab.

④ 

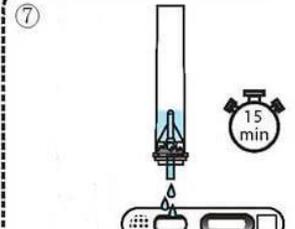
Führen Sie den Tupfer in das Lysepufferrohr ein. Drücken Sie das Röhrchen zusammen und rühren Sie den Tupfer 5 Mal um.

⑤ 

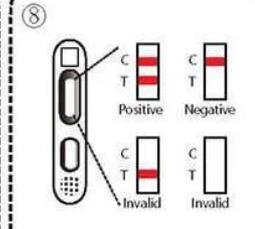
Drücken Sie das Röhrchen zusammen und entfernen Sie den Tupfer. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit aus dem Tupfer ausgedrückt wird.

⑥ 

Setzen Sie die Düsenkappe mit der Schutzabdeckung nach oben auf das Röhrchen. Durchmischen Sie die Flüssigkeit durch 10-maliges Schwenken und warten Sie 1 Minute.

⑦ 

Drei Tropfen der verarbeiteten Probe senkrecht in die Probenvertiefung geben und dann 15 Minuten stehen lassen.

⑧ 

Lesen Sie das Testergebnis sofort ab, das Testergebnis verliert nach 30 Minuten seine Gültigkeit.